

Fetal Pillow – 4 trinns brukerveiledning



Trinn 1: Innføring

- Brett Fetal Pillow i 2, og påfør lubrikasjonsmiddel.
- Før Fetal Pillow inn i skjeden, og se at ballongens overflate er i kontakt med barnets hode.



Trinn 2: Plassering

- Dytt Fetal Pillow så langt bak mot halebeinet som mulig.
- Plasseringen er lik som når man legger på vakuum.



Trinn 3: Bena ned

- Legg bena ned på operasjonsbordet – hvis ikke kan Fetal Pillow falle ut eller skifte posisjon.



Trinn 4: Blås opp

- Tilsett 180 ml væske ved å fylle den tilhørende sprøyten på 60 ml 3 ganger.

Se også bruksanvisning som følger med produktet.