

AVSLUTT Programmet avsluttes ved å trykke ON/OFF knappen igjen.

For best mulig holdbarhet av hudelektroderne, plassér elektrodene tilbake på plastfilmen og legg de tilbake i Plastposen som lukkes.

Oppbevares kjølig, gjerne i kjøleskap.

Ønsker du mer informasjon, se fullstendig brukermanual, oversikt over forhåndsinnstilte programmer, eller ring Quintet AS.




Quintet AS, Postboks 97 Bones, N-5849 Bergen Telefon: (+47) 55 98 15 55
Fax: (+47) 55 98 15 56 / Mail: post@quintet.no / Nettside: www.quintet.no

KORT BRUKERVEILEDNING NEUROTRAC TENS OBSTETRICS


TENS mot bekkenrelaterte smerter

AVANSERT
TENS-
APPARAT
EKKEN-
RELATERTE
SMERTER



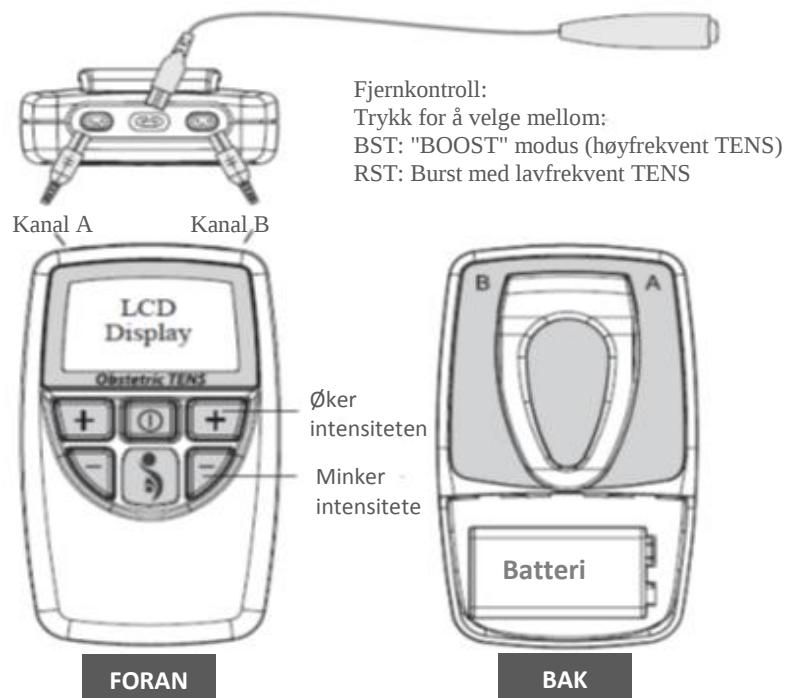

- BATTERI** Sett inn et 9 volts PP3 batteri eller et oppladbart Nickel Metal Hydride batteri i batterihuset på baksiden av NeuroTrac TENS Obstetrics.
- LEDNING** Plassér ledningen(e) i utgang A og/eller utgang B på toppen av apparatet. Du velger om du vil bruke én eller to ledninger, som gir henholdsvis plass til to eller fire hudelektroder. Knappen A + og A – styrer strømstyrken på utgang A, mens knappen B+ og – styrer strømstyrken på utgang B. Fjernkontrollen kobles til utgangen i midten på toppen av apparatet.
- HUDELEKTRODE** Koble til én hudelektrode til hver kontakt på ledningen som går fra utgang A og/eller utgang B.

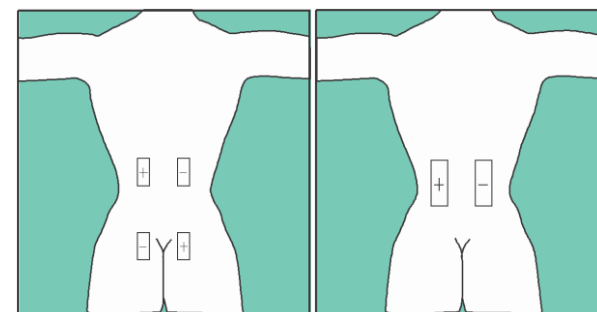

PLASSERING

Sørg for at huden rundt stimuleringsområdet er rent. Plassér elektrodene på nedre del av ryggen som vist på tegningen over (mer om elektrodeplassering på neste side).

SLÅ PÅ

Slå på Obstetrics ved å trykke på ON/OFF knappen.

BOOST VED SMERTE. SKRU OPP MED +

Skjermbildet viser "BST" som betyr at Obstetrics starter med høyfrekvent stimulering (BOOST). Frekvensen er satt til 90 Hz og pulsbredden er 220 us. Trykk på A+ knappen inntil du kjenner en komfortabel, prikkende følelse. Øk deretter videre. Du kan redusere intensiteten i stimuleringen ved å trykke A-.

KANAL B

Dersom du bruker begge kanalene/utgangene, gjør det samme som over vedr. kanal B.

RST VED PAUSE

Når smerterien avtar, trykk på fjernkontrollen og apparatet skifter til lavfrekvent stimulering samtidig som stimuleringsstyrken reduseres med 20%. Skjermbildet viser RST, og en annen type smertelindring igangsettes (endorfinfrigjøring).

TILBAKE TIL BOOST

Når smertene er på veg tilbake, trykk på fjernkontroll igjen og apparatet går tilbake til å gi høyfrekvent stimulering igjen (BST). Den stiller seg automatisk inn på samme intensitet som sist den var i denne modusen.