

Hurtigguide eAdvantage analgesiapparat

Kontroller, tilkoblinger og indikatorer



A Grønn LED for batteri driftsindikator	I Utgangstilkobling
B N ₂ O inngangstilkobling	J LED Bekreftelsesindikator
C Strøminngangstilkobling	K Kontrollknapp
D USB forbindelse	L Avbryt
E Alarmsummer	M Lyd pause-tast
F Grønn LED-indikator for vekselstrøm	N Oksygen flushfunksjon
G Oransje LED-indikator for batteri lading	O Oksygeninngangstilkobling
H Luftveistrykk overvåkingsport	P LCD Skjerm



- Påse at gasslanger er koblet til sentralgassanlegget, **B** og **O**
- Påse at strømkabel er koblet til vegg og kontakt i apparatet, **C**
- Skru på apparatet ved å holde inne kontrollknappen i ca 4 sekunder, **K**
- Apparatet utfører en selvtest før den er klar til bruk. Det tar noen sekunder.
- Koble til pasientslangen, på inspiratorisk og ekspiratorisk uttak, pluss sensor linjen, **I** og **H**.
- Still inn ønsket dosering ved å vri på kontrollknappen og trykke for å bekrefte valgt dosering, **K**

NB: apparatet stiller seg automatisk inn til et blandingsforhold på 50% O₂ og 50% N₂O når den slås på.

- Apparatet er nå klart til bruk på pasient.



NB! Denne hurtigguiden erstatter ikke den originale komplette brukermanual for eAdvantage. Se denne brukermanual for samtlige forsiktighetsregler og advarsler.