

## Prøvetaking av cellemateriale fra cervix ved bruk av Surepath

### UTSTYR TIL PRØVETAKING:

- Cervex brush **Combi** – anbefales brukt, men ikke på gravide!
- Cervex brush – brukes på gravide og ved vanskelige og stenotiske forhold.
- SurePath Preservative Fluid – væskebeholder




Velg riktig børste til prøvetaking og overfør børstehodet til væskebeholderen (i det store kammeret) straks etter at prøven er tatt.

**Børstehodet skal følge med i beholderen!** (se pkt.2)

Se videre veiledning:


### 1a. Fremgangsmåte ved prøvetaking med Cervex-Brush Combi:

1. Før den sentrale delen av børsten inn i cervixkanalen langt nok til at den nederste delen av børsten får god kontakt med ektocervix (se illustrasjonen).
2. Med et jevnt trykk roteres børsten 360 grader **TO** ganger MED klokken.
3. Børsten overføres straks til beholderen med BD Surepath Preservative Fluid.

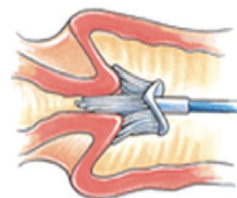

### 1b. Fremgangsmåte ved prøvetaking med Cervex-Brush:


1. Før den sentrale delen av børsten inn i cervixkanalen slik at børstens nederste del får kontakt med ektocervix (se illustrasjonen).
2. Med et jevnt trykk roteres børsten 360 grader **FEM** ganger MED klokken.
3. Børsten overføres straks til beholderen med BD Surepath Preservative Fluid.

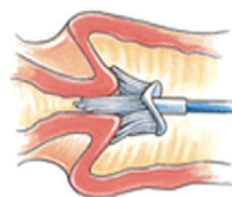

## 2. Overfør børsten til SurePath beholderen

Roter en kvart omdreining og bruk kanten til å trekke skaftet av fra børstehodet slik at den havner i det **største** kammeret.

- **Børstehodet skal følge med i beholderen**
- Skru lokket godt på
- Prøven er nå klar for innsending til lab.
- Én SurePath prøvebeholder er nok for hver pasient, dvs at to eller flere prøvefraksjoner fra en kvinne blandes i en og samme beholder. Tar du prøve fra to ulike lokasjoner som du vil skille må disse tas i hver sin prøvebeholder, og disse må merkes tydelig med lokasjon. Det skal kun være én prøve per rekvisisjon.

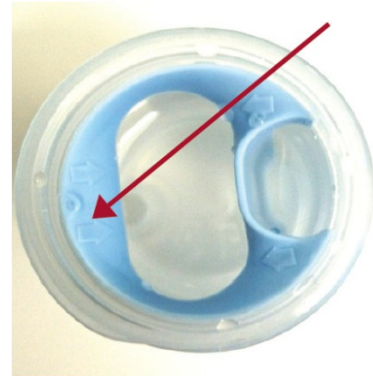

## 3. Merk prøvebeholderen

Navnelapp/etikett med fullstendig pasientidentifikasjon settes **over** 2D-koden og mot høyre.

**Viktig!** Unngå å sette etiketten over spalten i bunnen av beholderen og over lokket (se bilde), da dette vil forhindre roboten i å fjerne lokket. Unngå bretter og dårlig print på etiketten.



Referanser

Slutt på Informasjon